

# KIERO LINK

» Unión química entre metal y resina «  
» Esqueléticos y estructuras sobre implantes «

¡La innovadora unión química Metal-Resina fotopolimerizable para esqueléticos y estructuras sobre implantes!

The innovative light-curing system for metal-resin-bonding for implant and framework dentures!

Der innovative, lichthärtende Metall-Kunststoff-Verbund für die Implantat- und Modellgussprothetik!

KIERO Link asegura una excelente unión a largo plazo bajo cargas compresivas, de cizallamiento y tracción, impidiendo resquicios marginales sin someter al metal a elevadas temperaturas.

KIERO Link guarantees lasting bonds, excellent adhesiveness under pressure-, shear- and tensile stress. No gaps. No thermal stress on the metal frame.

KIERO Link gewährleistet einen dauerhaften Verbund, hervorragende Haftwerte bei Druck-, Scher-, Zugbelastung. Kein Randspalt. Keine thermische Belastung des Metallgerüsts.




- ▶ Para cualquier metal y acrílico  
With any alloy or resin  
Freie Legierungs- und Kunststoffwahl

- ▶ Individualización del opaquer  
Individualization of clasp with opaquer  
Individualisierung beim Opakerauftrag

- ▶ Resistente al monómero  
Monomer resistant opaquer  
Kein Anlösen des Opakers durch Monomer

- ▶ Fotopolimerizable en máquinas de mayor o menor potencia. Base UVA (320 – 400 nm)  
Polimerizable in any high or low performance light-curing unit in the UVA range (320 – 400 nm)  
Polymerisierbar in jedem leistungsstarken, -schwachen Lichtgerät im UVA-Bereich (320 – 400 nm)

Contiene: Tubo de bonding (4 g.), opaquer polvo (10 g.), opaquer líquido (10 ml)  
Contains: Tube with bonding (4 g.), Opaquer powder (10 g.), Opaquer liquid (10ml)  
Enthält: Tube mit Bonding (4 gr.), Opaker Pulver (10 g.), Opaker Flüssigkeit (10 ml)

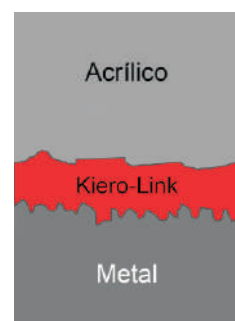

## USO I



Estructura con cofias galvánicas para telescópicas pegadas en boca  
The galvanized, telescope supported framework stuck in mouth  
Im Mund verklebte, teleskopgetragte Galvanostruktur



Con Basic Paste y opaquer  
With basic paste and opaquer  
Mit Basic Paste und Opaker

## USO II



Utilización del KIERO Link para estructura sobre implantes atornillada

Application of KIERO Link in a screwed implant supported denture  
Anwendung von KIERO Link bei einer verschraubten, implantatgetragenen Versorgung



### USO III



**Chorreado del metal con Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>**  
Sandblasting of the metal  
Das Metall wird sandgestrahlt



**Aplicación del Basic Paste**  
Application of the basic paste  
Auftrag der Basic Paste



**Fotopolimerización del Basic Paste**  
Curing of the basic paste  
Lichthärtung der Basic Paste



**El resultado: duro y mate**  
Mat cured bonding  
Matter, ausgehärteter Verbund



**Aplicación del opaquer (rosa/A3/blanco)**  
Application of the opaquer (pink/A3/white)  
Opakerauftrag (rosa/A3/weiß)



**Opaquero fotopolimerizado**  
Light-cured opaquer  
Lichtgehärteter Opaker



**La prótesis terminada bajo el punto de vista estético e higiénico**  
The finished denture in its esthetic and hygienic aspects  
Fertige Prothese unter ästhetischen und hygienischen Aspekten



### USO IV



**Esquelético con Basic Paste y opaquer rosa y A3**  
Framework with bonding and pink and A3 opaquer  
Klammerprothese mit Verbund und zahnfarbenen und rosa Opaker



**Prótesis combinada con Basic Paste y opaquer rosa y A3**  
Prosthesis with bonding and pink and A3 opaquer  
Kombimodellguss mit Verbund und zahnfarbenen und rosa Opaker



**Prótesis de larga duración con una transición metal-resina limpia**  
Finished denture with durable and definite metal-resin partitioning  
Fertige Prothese mit dauerhaften, sauberen Metall-Kunststoff-Übergängen



### USO V




**Estructura sobre implantes chorreada y con Basic Paste**  
Sandblasted implant supported structure with basic paste applied  
Sandgestrahlte, implantatgetragene Metallstruktur mit aufgetragener Basic Paste



**Superficie homogénea del opaquer polimerizado**  
Cured homogeneous surface of the opaquer  
Ausgehärtete homogene Opakeroberfläche



**Prótesis con refuerzo metálico de resultado más estético**  
Prosthesis with metal reinforcement esthetically upgraded  
Prothese mit Metallverstärkung ästhetisch aufgewertet

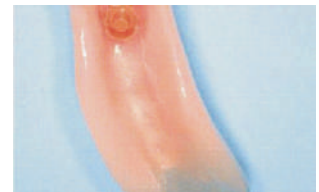

c/ Isabel Colbrand 10 Nave 95  
E-28050 Madrid - Spain  
Tel. + 34 91 736 23 17  
Fax. + 34 91 736 23 18  
www.kuss-dental.com

Distribuidor:



▶ Vídeo del producto